

Istruzioni per l'uso montatura di correzione



Ambito di applicazione:


Le montature da vista (montatura per occhiali con lenti da vista) sono dispositivi medici di Classe 1 (Regola 1) ai sensi del Capitolo III Allegato VIII del Regolamento (EU) 2017/745, il cui scopo essenziale è il collegamento con lenti oftalmiche prescritte dal medico per compensare i difetti visivi. Per un uso appropriato, è necessario che la montatura degli occhiali sia montata individualmente da un ottico specializzato. La montatura degli occhiali è conforme alla prescrizione di cui sopra.



La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <https://johann-v-goisern.com/documents/>.


Note:

Non si può escludere che persone particolarmente sensibili o soggette ad allergie possano avere effetti indesiderati quando entrano in contatto con i materiali e le lavorazioni utilizzate per le montature degli occhiali. La montatura è presentata con lenti di presentazione che non sono destinate all'uso, ma servono solo a mantenere stabile la forma della montatura e a consentire un'applicazione il più possibile simile al prodotto finale. La montatura degli occhiali non ha una durata infinita. In caso di utilizzo prolungato, la montatura degli occhiali deve essere controllata regolarmente da un ottico specializzato, poiché le piccole parti (ad esempio le viti) possono allentarsi e staccarsi, con il rischio che i bambini piccoli o gli animali domestici le ingeriscano. Se si notano segni di pressione o qualsiasi altra sensazione sgradevole quando si indossa la montatura, si prega di contattare l'ottico in modo che possa regolare la montatura in base alle esigenze individuali.

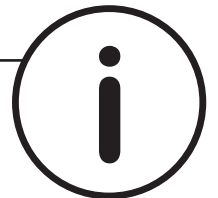

Stoccaggio e trasporto:

Il telaio da vista deve essere conservato nella sua custodia a una temperatura compresa tra -10°C e +35°C. Si deve evitare la conservazione sotto la luce del sole in ambienti chiusi senza aria condizionata (ad esempio il cruscotto di un'automobile), poiché le temperature raggiunte in queste condizioni possono compromettere la funzionalità della montatura (deformazione della montatura degli occhiali).

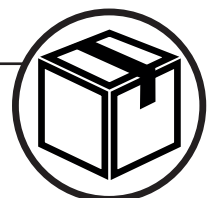

Istruzioni per l'uso montatura di correzione



Pulizia:

Per un funzionamento ottimale, pulire regolarmente gli occhiali con acqua pulita e un panno morbido. È possibile utilizzare anche un sapone neutro, un detersivo per piatti o i prodotti per la pulizia degli occhiali disponibili in commercio. In caso di contatto con reagenti quali acqua salata (acqua di mare), acqua di piscina, prodotti chimici (ad es. cosmetici, spray per capelli, creme solari e repellenti per insetti), si raccomanda la pulizia immediata con acqua pulita e la successiva asciugatura con un panno morbido. In caso di usura (ad es. graffi, perdita di lucentezza), si raccomanda la sostituzione con ricambi originali.



È assolutamente da evitare l'uso di solventi (ad es. alcol e acetone) e di detergenti chimici aggressivi, che potrebbero compromettere la funzionalità degli occhiali.

Garanzia del prodotto:

Si applicano le norme nazionali in materia di garanzia.



Marcatura:

Sulla confezione del prodotto, oltre al numero del modello e del colore, sono presenti anche un numero UDI-PI (Unique Device Identification - Production Identifier) e un numero UDI-DI (Unique Device Identification - Device Identifier). Questi numeri vengono utilizzati per identificare, contrassegnare e registrare i dispositivi medici. L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei pazienti attraverso la completa tracciabilità dei prodotti.



Produttore:

Pomberger Goisern GmbH
Au 131, 4822 Bad Goisern a. H., Austria
UID: ATU78604627
Numero di registro aziendale: 590054 b
Numero di licenza ARA: 4826
Sito web: www.pomberger.com

Informazioni di contatto:

Se non è possibile contattare l'ottico presso il quale è stato acquistato il prodotto, è possibile contattarci per reclami o domande inviando un'e-mail a office@pomberger.com o chiamando il numero +43 (0) 6135 7465.