

Guia de Utilizador



Abrangência da aplicação:


As armações oftálmicas corretivas (armações com lentes corretivas) são dispositivos médicos de Classe 1 (Regra 1) de acordo com o Capítulo III Anexo VIII Regulamento (UE) 2017/745, cuja finalidade essencial é a conexão com lentes oftálmicas prescritas por médicos para a compensação de problemas visuais. É necessária a montagem individual da armação por um ótico especializado para permitir o uso adequado. A armação está em conformidade com o regulamento acima.

A declaração de conformidade está disponível em <https://johann-v-goisern.com/documents/>.




Notas:

Não se pode excluir que pessoas particularmente sensíveis ou propensas a alergias possam experimentar efeitos indesejáveis ao entrar em contato com os materiais e acabamentos utilizados para as armações. A armação dos óculos é apresentada com lentes de apresentação, que não se destinam ao uso, mas apenas para manter a forma da armação estável e permitir um encaixe o mais próximo possível do produto final. A armação não tem vida infinita. Se a armação for usada por muito tempo, ela deve ser verificada regularmente por um ótico especializado, pois peças pequenas (por exemplo, parafusos) podem ficar instáveis soltar-se, e existe o risco de ingestão por crianças pequenas ou animais de estimação. Se notar pontos de pressão ou qualquer outra sensação desagradável ao usar a armação, entre em contato com seu o ótico para que ele possa ajustar a armação às suas necessidades individuais.

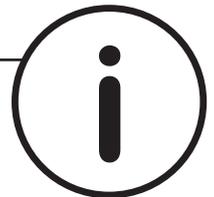

Armazenamento e transporte:

A armação deve ser armazenada no estojo próprio a uma temperatura entre -10°C e +35°C. O armazenamento sob a luz do sol em ambientes fechados sem ar condicionado (por exemplo, painel do carro) deve ser evitado, pois as temperaturas atingidas nessas condições podem afetar a funcionalidade da armação (ou seja, causar deformação na mesma).

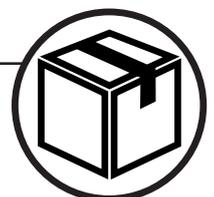

Guia de Utilizador



Limpeza:

Para um funcionamento ideal, limpe os óculos regularmente com água limpa e um pano macio. Um sabão neutro, detergente para lavar louça ou agentes de limpeza de óculos disponíveis comercialmente também podem ser usados. Em caso de contato com reagentes como água salgada (água do mar), água de piscina, produtos químicos (ex. cosméticos, spray de cabelo, protetores solares e repelentes de insetos), recomenda-se a limpeza imediata com água limpa e posterior secagem com um pano macio. Em caso de desgaste (por exemplo, arranhões, perda de brilho), recomenda-se a substituição por peças de reposição originais.

O uso de solventes (por exemplo, álcool e acetona) e agentes de limpeza químicos agressivos, que podem prejudicar a funcionalidade dos óculos, devem ser absolutamente evitados.



Garantia do produto:

Aplicam-se os regulamentos nacionais relativos a garantias.



Marcação:

Na embalagem do seu produto, encontrará o número de identificação única do dispositivo (IUD). Isso é usado para a identificação, rotulagem e registo de dispositivos médicos. O objetivo é aumentar a segurança do paciente por meio da rastreabilidade completa dos produtos.



Fabricante:

Pomberger Goisern GmbH
Au 131, 4822 Bad Goisern a. H., Áustria
UID: ATU78604627
Número do registo comercial: 590054 b
Número da licença ARA: 4826
Site: www.pomberger.com

Informações de Contato:

Se a Óptica onde a armação foi adquirida não puder ser contactada, você pode contactar-nos com reclamações ou dúvidas pelo e-mail office@pomberger.com ou pelo telefone +43 (0) 6135 7465.