

サングラス取扱説明書

製造元からのお知らせ:

これらのサングラスはEUのレギュレーション2017/745に準じております。ヨーロッパの場合はISO 12312.1に準じており、米国の場合はANSI Z80.3に準じております。

上記に関しては<https://johann-v-goisern.com/documents/>で確認することができます。使用されるレンズは、フィルターカテゴリ3に適合します。レンズは濃い色合いで、8~18%の光透過率に適合しており、100%のUV保護を備えています。




適用範囲:

サングラスは日光からのまぶしさ、自然からの紫外線(100%UV保護)、雪、雨、風から保護します。

衝撃、硬い物体、高放射のエネルギーランプ(UVランプ)やソラリウム(太陽光ランプ)などの人工光源に対する保護には適していません。人工光源の光に対しては、特別な保護のメガネが必要です。

また、これらのサングラスで太陽を直接見たり、日食を観察するための使用はしないでください。

夜間や視界の悪い場所での運転にはサングラスをかけないでください。光のレベルが低すぎてよく見えない場合はサングラスを外してください。

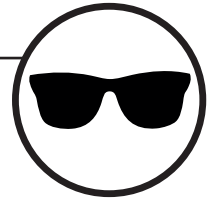

保管に関して:

サングラスは、-10°Cから+35°Cの間の温度でケースに保管する必要があります。これらの条件下で到達した温度はフレームの機能(フレームの変形)に影響を与える可能性があるため、エアコンのない閉鎖されたスペース(車のダッシュボードなど)で日光の下で保管することは避けてください。



サングラス取扱説明書

適用範囲:

最適な機能を保つために、定期的にきれいな水と専用の柔らかいクロスでメガネを拭いてください。中性洗剤、食器用洗剤又は市販の眼鏡洗浄剤も使用できます。塩水(海水)、プールの水、化学製品(化粧水、ヘアスプレー、サンクリーム、防虫剤など)のような試薬に接触した場合はすぐにきれいな水で洗浄し、そのあと柔らかいクロスで乾燥させることをお勧めします。摩耗(キズ、光沢の喪失など)が発生する場合は、元のスペアパーツと交換することをお勧めします。汚れたクリーニングクロスは汚れを取り除くことが出来ない可能性があります。フレームの機能に影響を与える可能性のある溶剤(アルコールやアセトンなど)や強力な化学洗浄剤の使用は絶対に避けてください。



適用範囲:

国内保障および保障規則が適用されます。



ラベル:

製品のパッケージには、モデルと色番号に加えて、UDI-PI(Unique Device Identification - Production Identifier)およびUDI-DI(Unique Device Identification - Device Identifier)番号もあります。これらの番号は、医療機器の識別、マーク付け、および登録に使用されます。目的は、製品の完全なトレーサビリティを通じて使用者の安全性を高めることです。



適用範囲:

Pomberger Goisern GmbH
Au 131, 4822 Bad Goisern a. H., Austria
UID: ATU78604627
Company registers number: 590054 b
ARA license number: 4826
Website: www.pomberger.com

適用範囲:

もし、購入先との連絡が取れ場合は、メールもしくは電話で下記にお問い合わせください。
office@pomberger.com or by phone at +43 (0) 6135 7465.