

Instruções para o uso de óculos de sol




Informações do fabricante:

Estes óculos de sol estão em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745. Para a Europa, a norma é ISO 12312.1, e nos EUA, de acordo com a norma nacional, ANSI Z80.3. A declaração de conformidade está disponível em <https://johann-v-goisern.com/documents/>. As lentes utilizadas correspondem à categoria de filtro 3. Ou seja, as lentes são de cor escura, adequadas para transmissão de luz de 8-18% e possuem 100% de proteção UV.




Áreas de uso:

Os seus óculos de sol protegem contra o brilho da luz solar, contra a radiação UV natural (proteção 100% UV), na neve, chuva e vento. Não indicado como proteção contra impactos, objetos duros, fontes de luz artificial como lâmpadas de alta energia radiante (lâmpadas UV) e solários (lâmpadas solares). Para fontes de luz artificial, precisa de óculos de proteção especiais. Além disso, não olhe diretamente para o sol com estes óculos de sol e não os use para observar um eclipse solar, com ou sem óculos de sol. Não use óculos de sol para conduzir à noite ou em más condições de visibilidade. Retire os óculos de sol quando o nível de luz estiver muito baixo para ver bem.

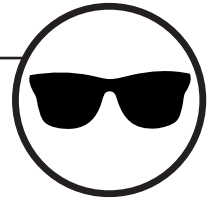

Armazenamento e transporte:

Os óculos de sol devem ser guardados no estojo a uma temperatura entre -10°C e +35°C. O armazenamento sob a luz do sol em espaços fechados sem ar condicionado (por exemplo, painel do carro) deve ser evitado, pois as temperaturas atingidas nessas condições podem afetar a funcionalidade da armação (deformação da armação).

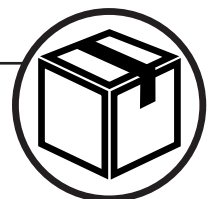

Instruções para o uso de óculos de sol



Limpeza:

Para um funcionamento ideal, limpe os óculos regularmente com água limpa e um pano macio. Um sabão neutro, detergente para lavar louça ou agentes de limpeza de óculos disponíveis comercialmente também podem ser usados. Em caso de contato com reagentes como água salgada (água do mar), água de piscina e produtos químicos (por exemplo, cosméticos, spray de cabelo, cremes solares e repelentes de insetos), recomenda-se a limpeza imediata com água limpa e a secagem posterior com um pano macio. Em caso de desgaste (por exemplo, arranhões, perda de brilho), recomenda-se a substituição por peças de reposição originais. Panos de limpeza sujos podem prejudicar as propriedades do filtro.



O uso de solventes (por exemplo, álcool e acetona) e agentes de limpeza químicos agressivos, que podem afetar a funcionalidade dos óculos, devem ser absolutamente evitados.

Garantia do Produto:

Aplicam-se os regulamentos nacionais de garantia.



Marcação:

(Identificação Exclusiva do Dispositivo - Identificador de Produção) e um UDI-DI (Identificação Exclusiva do Dispositivo - Identificador do Dispositivo). Esses números são usados para identificar, marcar e registrar dispositivos médicos. O objetivo é aumentar a segurança do paciente por meio da rastreabilidade completa dos produtos.



Fabricante:

Pomberger Goisern GmbH
Au 131, 4822 Bad Goisern a. H., Áustria
UID: ATU78604627
Número do registo comercial: 590054 b
Número da licença ARA: 4826
Site: www.pomberger.com

Informações de Contato:

Se a Óptica onde a armação foi adquirida não puder ser contactada, você pode contactar-nos com reclamações ou dúvidas pelo e-mail office@pomberger.com ou pelo telefone +43 (0) 6135 7465.